

BASKO

Aleksander Skoracki



Instrukcja użycia SplaylegSTOP®

Paski korekcyjne dla prosiąt z poporodową rozkrocnością kończyn tylnych

Czasami nowo narodzone prosięta borykają się z niedorozwojem mięśni kończyn tylnych (tzw. rozkrocność poporodowa prosiąt). Schorzenie, to jest łatwe do zdiagnozowania, ponieważ prosięta cierpiące na tę chorobę mają szeroko rozstawione tylne kończyny, nie pozwalające na wstawanie i poruszanie się. Sytuacja ta może doprowadzić do wycieńczenia, zagniecenia czy też śmierci z głodu.

Rozwiązaniem na tego typu problemy jest SplaylegSTOP® - gumowa taśma pozwalająca na przywrócenie muskulatury nóg prosięcia. Użycie tego produktu pozwala na ustalenie nóg prosiąt w pozycji stojącej (zbliżonej do naturalnej) i tym samym na poruszanie się i dostęp do pokarmu.


Istotnym jest, by założyć SplaylegSTOP® jak najszybciej po zauważeniu osobnika z tą wadą, dzięki temu zostanie przywrócona muskulatura obręczy kończyn tylnych w ciągu kilku dni i jednocześnie prosię odzyska naturalną pozycję nóg.

Trzy dni po rozpoczęciu stosowania SplaylegSTOP® należy monitorować rozwój zwierzęcia. Szacuje się, że prosię powinno odzyskać naturalną postawę w ciągu tygodnia.





1. Należy zdjąć folię ochronną ze spodniej części taśmy.

2. Delikatnie zawinąć pasek na tylnej nodze prosięcia.

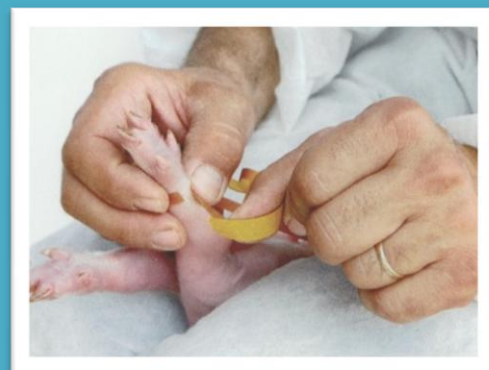

3. Powtórzyć czynność przy drugiej nodze i upewnić się, że dobrze trzyma się skóry.

4. Okręcić paski tak, by ich odprowadzenie było z tyłu nóg.

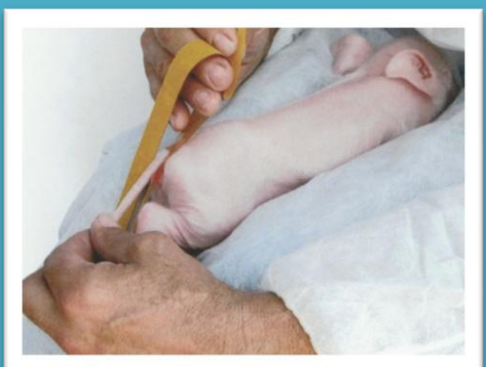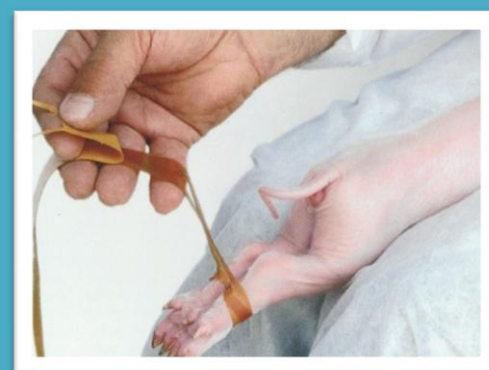


5. Przykleić taśmę nad ogonem zwierzęcia


6. Przyklejać taśmę wzdłuż kręgosłupa w kierunku dogłowym.



7. Umieścić pętle taśmy na szyi prosięcia.

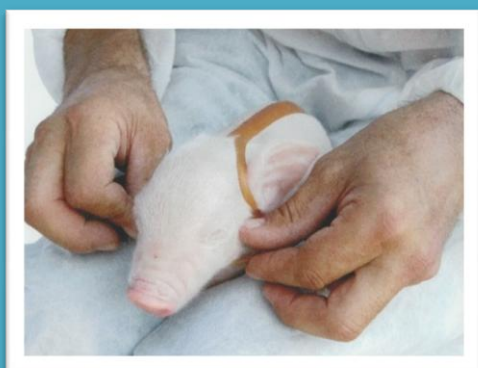

8. Postawić prosię na nogach i poczekać, aż złapie równowagę, by samodzielnie się poruszać.

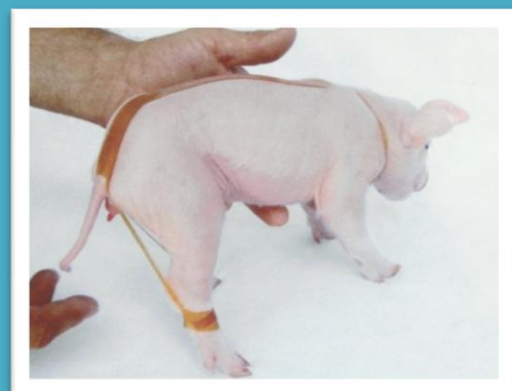

9. Można umieścić prosię w kojcu porodowym przy matce, by mogło pobierać pokarm wraz z innymi prosiętami. Monitorować przez 3 dni rozwój zwierzęcia.

